

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 (36616030)
電動鼻吸引器 NS-100

【警告】

- ・乳幼児の手の届くところに保管しないでください。
[誤飲やけがの恐れがある]

【禁忌・禁止】

- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。[誤作動や破損の恐れがある]
- ・吸引がうまく行えない場合は、医療従事者等の指導に従ってください。
- ・必ず専用 AC アダプターを使用してください。
[破損の恐れがある]
- ・専用 AC アダプターのコードやシリコンチューブが首などにからまないようにしてください。
[けがの恐れがある]
- ・使用中に異常や不安を感じた場合は、直ちに使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜くか、電源をお切りください。[けがや破損の恐れがある]
- ・機器は本書に記載されている使用目的以外の用途では、絶対に使用しないでください。[けがや破損の恐れがある]
- ・鼻ノズルが接触する部分に傷口や出血がある場合は、使用しないでください。[症状が悪化する恐れがある]
- ・電動部や AC アダプターは絶対に分解しないでください。
[感電事故や火災など、安全上重大な影響を及ぼす可能性
がある]
- ・濡れた手で専用 AC アダプターを取り扱わないでください。
[感電のおそれがある]
- ・定格時間を越えた連続運転を行わないでください。(片鼻 10 秒まで) [粘膜を傷つけるおそれがあるため]
- ・1 回の使用中に 15 分以上電源を入れっぱなしにしないでください。[破損の恐れがある]
- ・落としたり倒したりなど強い衝撃を与えないでください。
[破損の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

〈概要〉

本品は電動式で、ポンプモーターにより陰圧を発生させ、先端ノズルから鼻腔内の鼻水を吸引する。対象患者は乳幼児及び小児とする。

〈形状〉

構成部品：

- ・鼻水キャッチャー
- ・シリコンチューブ
- ・鼻ノズル（小、大）
- ・AC アダプター



本体

外形寸法：約 118.5mm × 130 mm × 168 mm

質量：約 750 g

皮膚に触れる部分の材料：シリコン（鼻ノズル）

〈電氣的定格〉

電撃に対する保護の形式による分類：クラス II 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部
最大作動時間：15 分
最小休止時間：15 分
定格電圧：DC 12.0V、2.0A

AC アダプター（型番：MKE2-1202000HJPD）

入力：AC100-240V、50/60Hz 0.8A

出力：DC12.0V 2.0A

〈原理〉

電動式で、ポンプモーターにより陰圧を発生させ、先端の鼻ノズルから鼻腔内の鼻水を吸引する。

【使用目的又は効果】

本品は鼻腔内の鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

使用前

- 1) シリコンチューブで本体と鼻水キャッチャーを接続する。
- 2) 鼻水キャッチャーに鼻ノズルを取付ける。
- 3) 専用 AC アダプターを商用電源に接続し、本体の差込口に接続する。

使用中

- 1) 電源スイッチを押して吸引を開始する。
- 2) 患者の鼻孔に鼻ノズルを挿入する。(1 回の吸引は 10 秒以内を目安とし、数回に分けて行う。)

使用后

- 1) 電源スイッチを押して吸引を止める。
- 2) 専用 AC アダプターを本体から取り外す。
- 3) シリコンチューブを本体から取り外す。
- 4) 鼻ノズルを鼻水キャッチャーから取り外す。
- 5) 本体の電動部は洗浄・消毒できない。乾いた布で清拭し、汚れがひどい場合は、希釈した中性洗剤を含ませた布をかたく絞り拭き取る。
- 6) 取り外した各パーツは、中性洗剤でよく洗い乾燥させる。シリコンチューブに鼻水が浸入した場合も、同様に洗浄し乾燥させる。
- 7) 各パーツは必要に応じて以下方法で消毒を行う。
 - ・哺乳瓶等の消毒液を用いる。
(消毒液は本製品に含まない。)
 - ・多めの水を入れた大きめの鍋等に浸漬して、3～5 分間煮沸する。

【使用上の注意】

- ・鼻ノズルを鼻孔に挿入するときには、鼻腔内部に傷をつけないように注意して、ゆっくり挿入してください。また、鼻ノズルを、深く挿入しないでください。
- ・鼻水キャッチャーには必ず鼻ノズルを装着した状態で使用してください。
- ・本体と専用 AC アダプターは防水ではありません。水や液体がかからないようにしてください。
- ・使用中に本体から発煙、異音、異臭などがした場合は直ちに電源を切り、使用しないでください。
- ・機器を長期間使用しなかった場合は、使用前に必ず清掃、点検をしてから使用してください。
- ・本品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは安定した姿勢で使用してください。
- ・乳幼児の手が届くところや、不安定な場所には保管しないでください。
- ・乳幼児が、小さな部品を誤って飲み込まないように注意してください。

取扱説明書等を必ずご参照ください

【保管方法及び有効期間等】

〈使用環境条件〉

周囲温度：＋5℃～＋40℃

相対湿度：15～90%（結露なきこと）

〈保管環境条件〉

周囲温度：-25～70℃

相対湿度：15～90%（結露なきこと）

〈耐用期間〉

標準的な使用期間：3年

〔自己認証（T O K I O L a b社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- ・取扱説明書をよくお読みになり、正しい方法で洗浄・消毒してからご使用、あるいは保管してください。
- ・清掃には洗剤やクリーナーで洗浄せず水のみで洗浄してください。〔本品が損傷する可能性がある。〕
- ・キズ、腐食、汚れがないことを定期的に確認してください。
- ・直射日光、ホコリ、湿気の少ない場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

業者名：株式会社 I C S T

T E L ：048-857-8026

〈製造業者〉

業者名：株式会社 T O K I O L a b

国 名：日本