

ポータブルコンプレッサー式

# ネブライザ



充電式



ハンディ  
タイプ



外出先も  
安心



ポータブルコンプレッサー式  
ネブライザ CN-200

01



## 便利な充電式

充電式のため電源を繋がずに使用することが可能です。家の中だけでなく、外出先や旅行先での喘息の症状にも対応できます。

02



## 持ち運びラクラク

持ち運びしやすい形状なので、外出の際もストレスなく持参できます。手のひらサイズのためお子様でも簡単に持ち運べます。

03



## 便利な 2WAY 吸入

本体を手を持ってそのまま吸入する方法と、ホースを接続して吸入する方法の2通りの使い方が可能です。※付属のゴム紐でハンズフリー吸入も可能

04



## 様々な薬液に対応

ほとんどの薬液に対応しているため、使用する薬剤が変更になった場合も安心です。※詳細は裏面をご確認ください。

ポータブルコンプレッサー式  
**ネブライザ**  
CN-200  
セット内容



本体



ネブライザーキット



マスク (大)



マスク (小)



マウスピース



USB ケーブル



ネブライザー  
ホース



エアフィルター  
(予備 5 個)



コネクター



マスク紐



収納ポーチ



ノーズピース  
(別売品)

【保証書付き取扱説明書・添付文書】

仕 様

製造販売届出番号	11B1X10017000090
医療機器分類	一般医療機器
一般的名称	非加熱式ネブライザ
販売名	ポータブルコンプレッサー式ネブライザ CN-200
型番	CN-200
バッテリー容量	7.4V 1200mAh (リチウムイオン電池)
定格電力 (入力)	DC5V ≒ 2.0A (USB ケーブル)
噴霧能力	≥0.20ml/min
噴霧粒子径	MMAD≤3.8 μm ± 25%
薬液カップ容量	8ml
寸法	約 59 (L) × 59 (W) × 131 (H) mm
質量	約 250g (ネブライザーキットと ネブライザーホースを含まず)
使用環境条件	温度: 5~40°C 湿度: 15~80%RH (結露なきこと) 気圧: 700~1060hPa
保管環境条件	温度: -20~60°C 湿度: 10~90%RH (結露なきこと) 気圧: 700~1060hPa

ネブライザに使用可能な薬剤一覧

薬効分類名	薬剤名	一般名	CN-200
気管支拡張剤	メプチン	ブロカテール 塩酸塩水和物	○
	ベネトリン	サルブタモール硫酸塩	○
	イノリン	トリメトキノール 塩酸塩水和物	○
吸入用気管支拡張剤	アスプール	dl- イソプレナリン 塩酸塩	○
喘息治療剤	インタール	クロモグリク酸 ナトリウム	○*
	クロモグリク酸 Na	クロモグリク酸 ナトリウム	○
気道粘液溶解剤	ピソルボン	ブロムヘキシン塩酸塩	○*
	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩	○*
	ムコフィリン	アセチルシステイン	○*
吸入ステロイド 喘息治療剤	パルミコート	ブデソニド	○
	ブデソニド	ブデソニド	○
呼吸器官用吸入剤	アレパール	チロキサポール	○

\*他の薬剤と混同すると白濁、または沈殿する可能性があります。

●上記の表は医薬品情報をもとに当社で作成したもので、ネブライザで使用可能な薬剤の参考資料です。機器の噴霧性能を保証するものではありません。

●医師から処方されていない薬剤は、ネブライザに使用しないでください。薬剤の種類・用量・用法については必ず医師の指示に従ってください。誤った使用は症状の悪化につながるおそれがあります。

●単独で使用可能とされる薬剤であっても、混合薬液や希釈液の種類・量によっては、噴霧が停止したり機器の故障を招く場合があります。その結果、症状が悪化する可能性もあるため、混合や希釈についても必ず医師の処方に従ってください。

大切な家族の笑顔のために

正しくお使いいただくために ※下記の条件でお使いください。

- ・本製品は医療機器です。必ず専門の医師の指導に従って正しくご使用ください。
- ・水の吸入はしないでください。薬液以外の吸入はしないでください。
- ・加湿目的で使用しないでください。
- ・小さなお子様又は体が不自由な方が使用する場合は保護者の方が必ず付き添ってください。誤った使い方により、症状が悪化するおそれがあります。
- ・製造元以外が提供したUSBケーブルは使用しないでください。



製造販売業者

株式会社 ICST

〒338-0001

埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー

Tel: 048-857-8026 Fax: 048-857-8041

URL: <http://icst.jp>

製品の詳細は  
こちらから▶

