

仕様

| | |
|------|-----------------------|
| 定格入力 | DC 19V、5.26A |
| 定格出力 | DC 19V、3.2A |
| 寸法 | 約84.16*96.3*112.87 mm |
| 重量 | 128.5±15g(バッテリー含まず) |

環境条件

| | |
|--------|---|
| 使用環境条件 | 温度:0℃~40℃ 湿度:95%以下 温度検出:-40℃~125℃ |
| 保管環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:45%~95% 気圧:70~106kPa |

保管場所

- この充電器は、保管環境条件下で正しく保管して下さい。
- 腐食性物質、火、熱源の近く、水のかかる恐れがあるところで保管しないで下さい。

警告

1. 短絡電流による火災の危険を防ぐため、表面が損傷したバッテリーを使用しないで下さい。
2. 室内 0℃～40℃の環境温度下でのみご使用下さい。
3. 分解や改造をしないで下さい。
4. 充電器に衝撃を与えたり強い圧力をかけたりしないで下さい。破損する可能性があります。

外国製造業者

Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co.,Ltd.
国名: 中華人民共和国

販売業者



埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー
TEL: 048-857-8026 FAX: 048-857-8041
WEB: <https://icst.jp/> Email: info@icst.jp

Nozomi®

ポータブル酸素濃縮器OG-Pシリーズ
取扱説明書(充電器)

2023年5月制定(初版)

インジケータライト
(バッテリー充電量表示)



特徴

この充電器は、OG-P シリーズのバッテリーを充電するためのもので、高精度の電圧コンパレータ IC を用いる事により最適に充電が行われます。バッテリー充電メーターは 5 段階のインジケータライトでご確認頂けます。

絶対に、他の製品を充電しないで下さい。

専用アダプター以外のアダプターは
使用しないで下さい。

注意



操作説明

1.AC/DC アダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込み、コネクタを充電器に接続します。



2.バッテリーを水平方向にカチッという音がするまで充電器に差し込みます。



3.充電中は充電器の上部にあるインジケータライトが緑色に点滅します。



4.バッテリーが完全に充電されると、5つの緑色のインジケータライトが全て点灯します。



5.充電器のつまみを押し下げたまま、バッテリーを水平にスライドさせ取り外します。



6.電源コンセントから AC/DCアダプターの電源プラグを抜き、AC/DCアダプターのコネクタも充電器から抜きます。

表示機能

| インジケータライト | バッテリー充電量 |
|-----------|----------|
| | 0%~25% |
| | 25%~50% |
| | 50%~75% |
| | 75%~99% |
| | 100% |

5つの緑色のインジケータが1秒/1回で点滅する場合は、以下の原因が考えられます。

- (1) 入力電圧が 17V 未満または 21V 以上
- (2) バッテリーの温度が 65 °C 以上
- (3) 充電器の温度が 60 °C 以上

バッテリー又は充電器の温度が下がるまでお待ち下さい。